





Anleitung zur Herstellung eines Mehrweg-Mund-Nasen-Schutz (MNS)

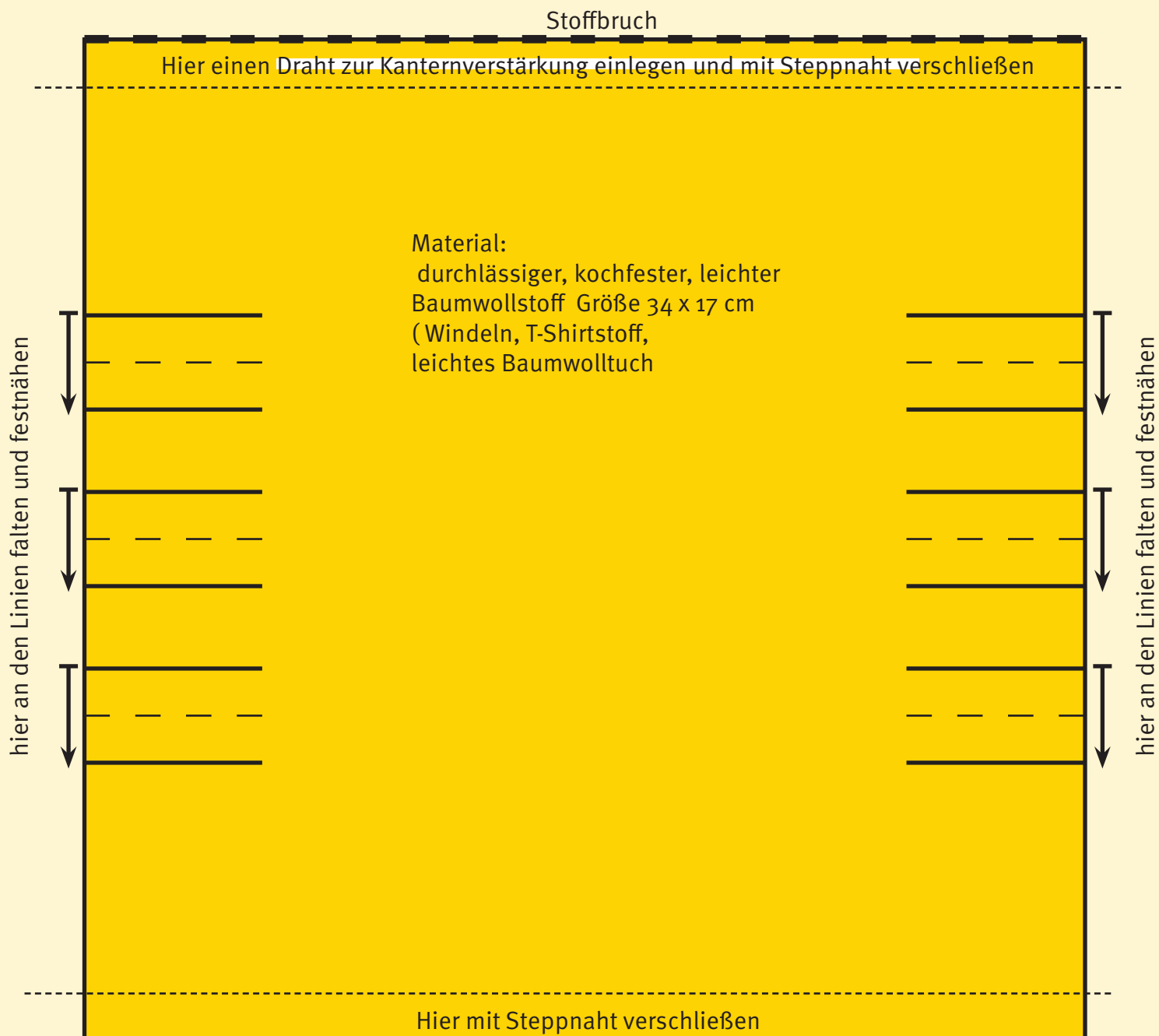

Schnittmuster

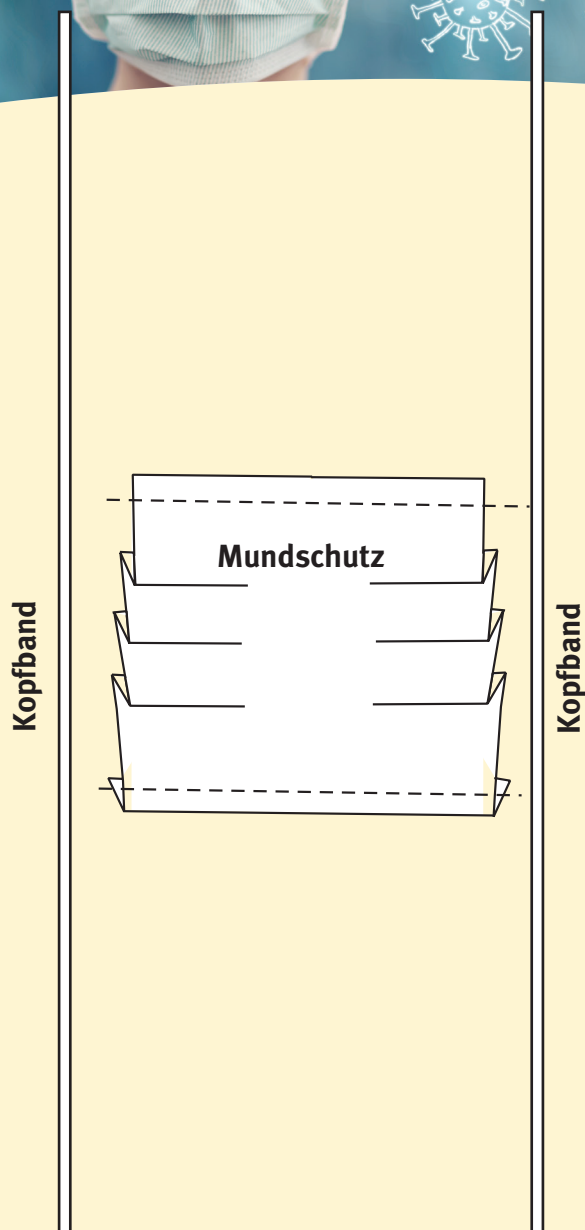

Was Sie benötigen:

1. Für den Schutz: durchlässiger, kochfester, leichter Baumwollstoff Größe 34 x 17 cm (Windeln, T-Shirtstoff, leichtes Baumwolltuch)
2. 2 Streifen aus Baumwolle zum binden Größe 90 x 2 cm (oder Gummilitze)
3. einen 15 cm langen, dünnen Draht (Basteldraht, Pfeifenreiniger, Klemmdraht von Gefrierbeuteln)

Anleitung

1. Schneiden Sie aus einem geeigneten Stoff ein Rechteck in der Größe 34 x 17 cm aus.
2. Falzen Sie den Stoff, dass eine Fläche von 17 x 17 cm entsteht.
3. Einen Draht zur Kanternverstärkung einlegen und mit Steppnaht verschließen
4. Übertragen Sie die 6 Linien von unserem Schnittmuster auf Ihren Stoff.
5. Legen Sie den Stoff links und rechts an diesen Linien in Falten, so wie angezeichnet und nähen Sie einmal darüber, um die Falten zu fixieren.
6. Versäubern bzw verstärken Sie die untere Kante mit einer Naht
7. 2 Kopfbänder , 90 cm lange und 2 cm breite Streifen ausschneiden und mittig auf 1 cm bügeln (Sie können auch stattdessen Gummiband verwenden)
8. Diese Streifen nähen Sie jetzt mittig über die fixierten Falten an der Seite links und rechts.

Pflege und Reinigung

Der Mehrweg- Mundschutz ist grundsätzlich trocken zu lagern. Nach der Benutzung ist der Mehrweg- MNS vorsichtig auszuziehen und möglichst dabei die Außenfläche nicht zu berühren. Nach dem Ausziehen sollte eine Händewaschung durchgeführt werden. Gebrauchte MNS sollten nach der Benutzung bzw. mindestens einmal täglich gereinigt werden. Sie können entweder bei 90°C in der Waschmaschine gewaschen oder auf dem Herd in einem Wasserbad (5 Minuten) ausgekocht werden. Anschließend ist der MNS zu trocknen.

Wichtiger Hinweis:

Dieser Mundschutz wird komplett selbst gefertigt, er ist weder geprüft noch zertifiziert. Er dient nur als sinnvolle Alternative, wenn keine MNS mehr zu bekommen sind. Die Herstellung und Benutzung ist eigenverantwortlich.